

Gebrauchsanleitung BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff

BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff

Die Gebrauchsanleitung dient der Information von Arzt, Pflegepersonal und Anwendern zur fachgerechten Handhabung.

Bitte vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

ZWECKBESTIMMUNG:

Das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff dient zur vorübergehenden und sicheren Abdichtung des Tracheostomas.

Das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff findet Anwendung z.B. beim Weaning von tracheotomierten Patienten und nichtinvasiver Beatmung sowie bei Abklärung eines Tracheostomaverschlusses.

ANWENDUNG:

Vor dem Aufkleben des BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff muss die Haut um das Tracheostoma gründlich gereinigt und entfettet werden. Der Cuff des BMV® Weaning Dekanülierungspflaster wird mittig über das Tracheostoma geklebt. Hierbei empfehlen wir die lange Klebelasche D in Richtung Bifurkation auszurichten. Darüber hinaus ermöglicht die großzügige Klebefläche eine individuelle Anpassung indem Sie diese zuschneiden können, um ggf. Hindernisse (z.B. Anatomie oder Zugänge wie ZVK oder Port) auszugleichen. Um Leckagen zu vermeiden muss das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster nach entfernen der Trägerfolie intensiv auf die Haut massiert werden.

Nach Platzierung des Pflasters, dient der Cuff zur Abdichtung des Tracheostomas. Bedingt durch das geringe Druckniveau, was zu Abdichtung erreicht werden muss können Drucknekrosen vermieden werden. Über den Füllschlauch (E) mit Rückschlagventil

lässt sich der Cuff mit Luft befüllen. Hierbei darf maximal eine Menge von 20 ml nicht überschritten werden. Das BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff ist ein Ein-Patienten-Produkt und zur Einmalverwendung bestimmt.

Achtung:

Das BMV® Weaning Dekanülierungspflasters mit Cuff ist ausschließlich nur bei Tracheotomierten einzusetzen.

Nutzungsdauer:


Die Nutzungsdauer des BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, dabei spielen zum Beispiel Hautbeschaffenheit sowie anatomische Verhältnisse eine entscheidende Rolle. Der Austausch sollte nach spätestens fünf Tagen vorgenommen werden, wenn nicht auf Grund des Krankheitsbildes ein vorzeitiger Wechsel indiziert ist.

SICHERHEITSHINWEIS:

Eine Mehrfachverwendung des BMV® Weaning Dekanülierungspflasters mit Cuff ist nicht zulässig. Hautirritationen oder allergische Reaktionen sind bislang nicht bekannt. Die BMV® Weaning Dekanülierungspflaster mit Cuff sind bei einer Raumtemperatur von ca. 21 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 50% aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung während der Lagerung schützen!

ENTSORGUNG:

Die Entsorgung des Produktes darf nur entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen für Abfallprodukte vorgenommen werden.

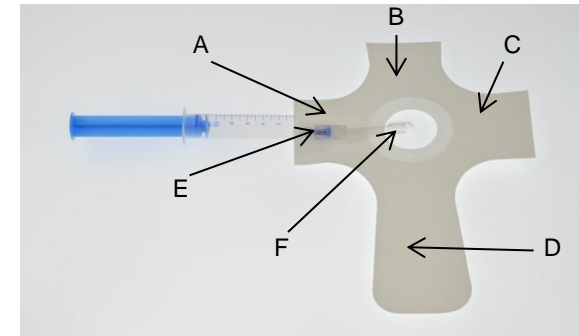

Produktkomponenten:

- A: Klebelasche
- B: Klebelasche
- C: Klebelasche
- D: Klebelasche
- E: Füllschlauch
- F: Cuff

Exklusiv-Vertrieb

steramed Medizintechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 10, 27777 Ganderkesee

Tel.: +49 42 22 80 75 0

Email: info@steramed.de

HERSTELLER/KONFORMITÄT

BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH

Email: www.bmv-med.de

Produktänderungen seitens des Herstellers sind jederzeit vorbehalten.

BMV® ist eine eingetragene Marke der BMV® Bender Medical Vertrieb GmbH

Produkt „Made in Germany“

